

NSK

**Титановый корпус
Внутреннее охлаждение
Угловой наконечник**

**Ti-Max
Ti10L / Ti15L / Ti20L / Ti25L (с оптикой)
Ti10 / Ti15 / Ti20 / Ti25 (без оптики)**

Инструкция по эксплуатации

Прочитайте данную инструкцию перед использованием прибора.

Меры предосторожности:

- Наконечник предназначен только для стоматологического лечения.
- Самое важное для врача - безопасность пациента.
- Если работа прибора вызывает сомнения, необходимо немедленно выключить прибор и обратиться в сервисную службу для ремонта.
- Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Избегайте падения наконечника.
- Не нажимайте кнопку на головке наконечника во время вращения бора.
- Во время работы не прислоняйте головку наконечника к щеке пациента.
- Не отсоединяйте наконечник до полной остановки мотора.
- Не используйте изношенные или поврежденные боры.
- Перед использованием убедитесь в правильной установке бора.
- Не превышайте уровень скорости, рекомендованный производителем.

1. Спецификации

Модель	Бор	Максимальная скорость	Передача вращения	Свет
Ti10L	Ø 2,35 Бор с защелкой	40,000 об/мин.	16 : 1	Световод
Ti15L	Ø 2,35 Бор с защелкой	40,000 об/мин.	4 : 1	Световод
Ti20L	Ø 1,6 Бор FG	40,000 об/мин.	1 : 1	Световод
Ti25L	Ø Бор с защелкой	40,000 об/мин.	1 : 1	Световод
Ti10	Ø Бор с защелкой	40,000 об/мин.	16 : 1	Нет
Ti15	Ø Бор с защелкой	40,000 об/мин.	4 : 1	Нет
Ti20	Ø 1,6 Бор FG	40,000 об/мин.	1 : 1	Нет
Ti25	Ø Бор с защелкой	40,000 об/мин.	1 : 1	Нет

2. Установка и удаление бора

(1) Установка бора

а) Бор с защелкой

Установите наконечник на микромотор с внутренним охлаждением или пневмомотор. Вставьте бор с защелкой в головку наконечника. Не прилагая усилий, вставьте бор в головку.

При соприкосновении бора с защелкивающим механизмом, еще раз надавите на бор.

Примечание: Проверьте крепление бора вручную как показано на рис.2.



Рис. 1

Рис. 2

б) Бор типа FG (E20L/E20)

Вставьте бор в головку наконечника до упора (6 мм).

Снова нажмите кнопку и еще дальше продвиньте бор в головке наконечника.

Примечание: Проверьте крепление бора вручную как показано на рис.3.


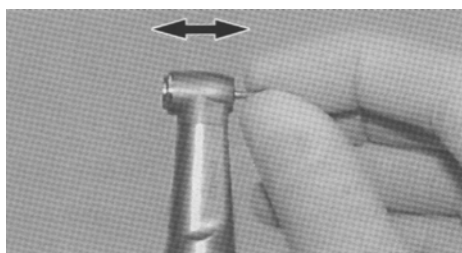


Рис. 3

(2) Удаление бора

Нажмите на кнопку головки наконечника и удалите бор.

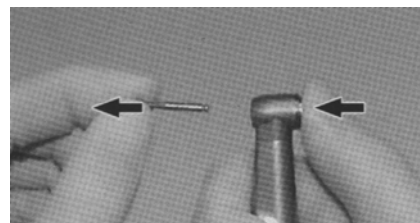


! Внимание

Прежде чем нажать на кнопку убедитесь в полной остановке мотора. Ни при каких обстоятельствах не нажимайте кнопку во время вращения мотора.

3. Смазка

Смазывайте наконечник спреем PANA-SPRAY после каждого использования перед обработкой в автоклаве. Установите насадку Е-типа на пластиковое сопло спрея повернув 10 раз по часовой стрелке. Установите сопло Е-типа на заднюю часть наконечника и смазывайте в течение 2 секунд.

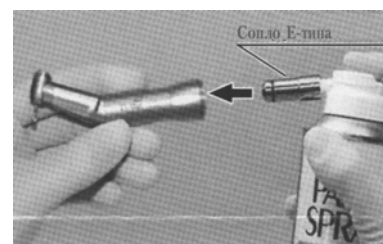

Примечание:

- Держите банку со спреем в вертикальном положении.
- Во время смазки удерживайте наконечник крепко, т.к. он может выскочить из сопла Е-типа в результате давления.

4. Стерилизация

Рекомендуется стерилизация в паровом автоклаве.

Стерилизация в автоклаве:

1. Очистите наконечник от пыли и грязи кусочком ткани, смоченным в спиртовом растворе. Не используйте проволочную щетку.
2. Смажьте наконечник спреем PANA-SPRAY.
3. Поместите наконечник в стерилизационный пакет и заклейте.
4. Автоклавируйте в течение 15 минут при температуре 132 °С.

Примечания:

- Если температура камеры может превысить 132 °С, пропустите фазу сушки.
- Поместите наконечник на среднюю или верхнюю полку стерилизационной камеры, т.к. температура на нижней полке может превышать установленные параметры.

5. Чистка световода

В случае, когда свет стал рассеянным, следует прочистить фиброоптический выход ватным тампоном, смоченным в спирте (Рис.20). Если фиброоптический выход поврежден, отправить наконечник для ремонта Вашему местному дилеру.

Примечание: Не используйте острые предметы для чистки световода.

